

# SR Vivodent® S PE

O dente com estética excepcional para necessidades sofisticadas



## Carta de formas de dentes




SR Vivodent® S PE  
SR Orthotyp® S PE



**ivoclar**

# PEQUENO

## SR Vivodent® S PE





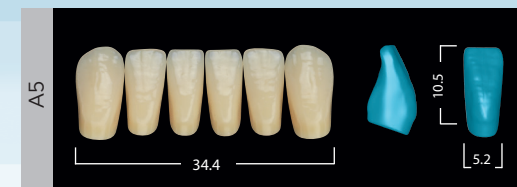
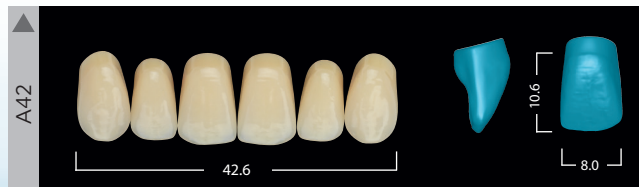
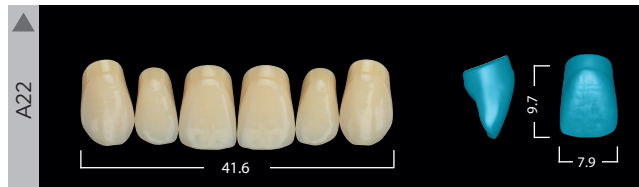


## SR Orthotyp® S PE



# MÉDIO

## SR Vivodent® S PE

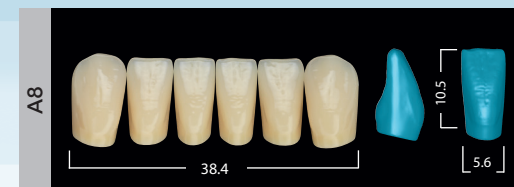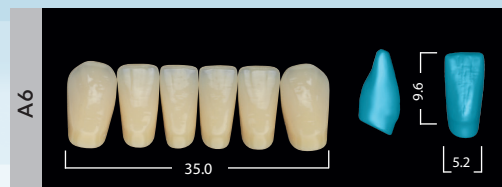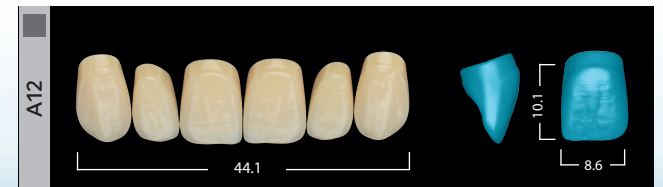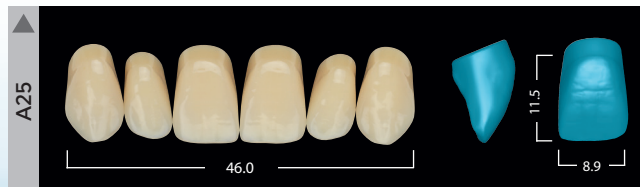
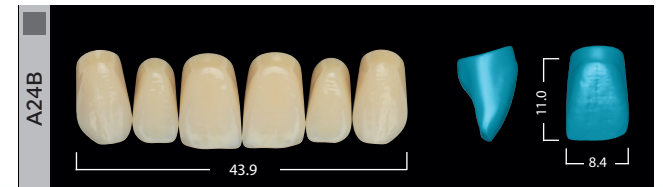
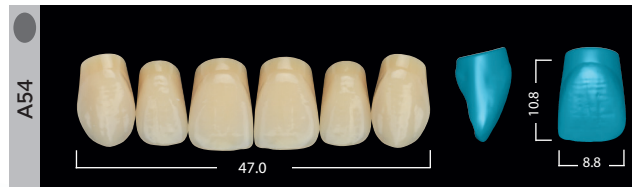
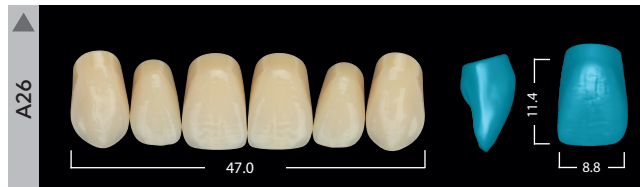


## SR Orthotyp® S PE



# GRANDE

## SR Vivodent® S PE

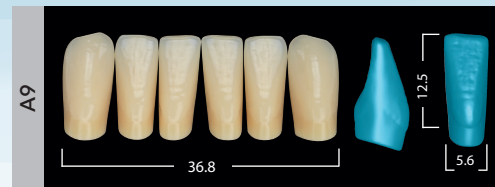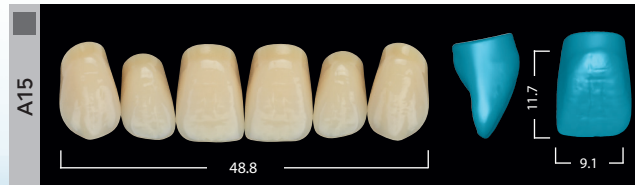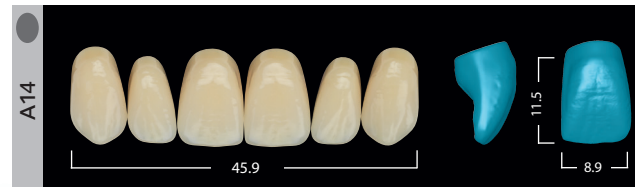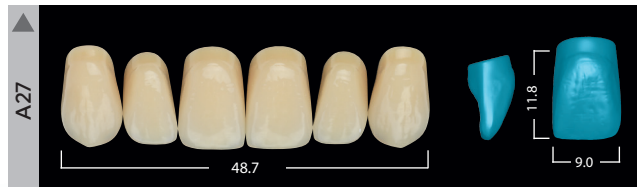

## SR Orthotyp® S PE



# INSTRUÇÕES DE PROCESSAMENTO

## Cores

### SR Vivodent® S PE:

– 11 Cores PE (01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 3E, 4B).

## Seleção de cores

As cores dos dentes são determinadas com a ajuda de uma escala de cores disponível no sistema de cores PE sendo que as amostras de dentes da escala apresentam a mesma estrutura de camadas e materiais dos dentes originais comercializados.

A seleção de cores junto ao paciente devem ser realizada em ambiente claro (temperatura de cor de 5.500 K) ou sob a luz do dia.



## Dente Anterior

### Seleção dos dentes anteriores

Se possível, os dentes anteriores devem ser selecionados diretamente com o paciente de acordo com características anatômicas e mímicas. Os dentes anteriores são divididos em formatos triangulares, ovais e quadrados. No entanto, é importante notar que, cada modelo tem a sua própria característica.

### Formas Triangulares

Este grupo é caracterizado por dentes com uma coroa que se estreita em direção ao colo cervical. A curvatura labial vertical é moderada.

### Formas Ovais

Os dentes desta categoria têm uma curvatura pronunciada. A curvatura vestibular é particularmente marcada.

### Formas Quadradas

Com essa forma angular, o incisivo central é dominante. A curvatura labial vertical é moderada.

### Consultório

O Facial Meter permite uma seleção rápida e direcionada do tamanho apropriado do dente anterior.

Passo 1: Medir a largura interalar do nariz com o medidor facial e selecionar o tamanho do dente adequado S / M / L.

Passo 2: Selecionar entre as formas de dentes triangular, oval e quadrada do grupo de tamanho selecionado.

O Papilla Meter é o dispositivo ideal para a definição do comprimento do lábio superior e do fechamento dos lábios.

Especialmente para o comprimento dos dentes anteriores, a linha labial fornece uma das informações mais importantes.

### Laboratório

Os pontos de referência a seguir são determinados com a ajuda de uma análise de modelo:

- Posição dos caninos - Identificar o primeiro grande par de rugas palatinas. O ponto médio da superfície vestibular dos caninos superiores está alinhado à uma distância de aproximadamente 9 mm.
- Ponto de contato dos incisivos centrais - A superfície vestibular dos incisivos centrais está alinhada à uma distância de aproximadamente 7 mm do centro da papila incisiva.

O comprimento do arco medido através desses três pontos pode ser usado como referência para selecionar um conjunto de dentes anteriores com uma largura adequada da carta de formas de dentes.

## Dentes posteriores

Esta carta de formas de dentes facilita a seleção de tamanhos para coincidir os dentes posteriores com os dentes anteriores selecionados.

A Ivoclar Vivadent oferece uma variedade de dentes posteriores, que dá ao profissional a oportunidade de selecionar um formato que melhor atenda às necessidades funcionais e estéticas do paciente.


### Conceito oclusal

SR Orthotyp S PE é a escolha clássica para uso em próteses totais, parciais, híbridas e sobre implante. São configurados de acordo com uma situação de mordida normal em uma relação de um pra dois os primários na posição central estão localizados na fossa central mandibular, bem como nas cristas

### Oclusão clássica



### Configuração de um pra dois dentes

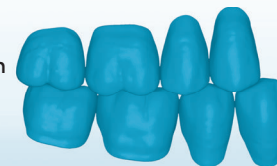

### Espessura mínima de camada

Deve ser assegurado que a estabilidade dos dentes e o correto efeito de cor sejam mantidos. Portanto, é recomendado observar a espessura mínima da camada.

- Dentes anteriores: mínimo de 2,5 mm
- Dentes posteriores: fossa central mínimo de 2,0 mm, nas pontas das cúspides mínima de 2,5 mm e área cervical mínima de 2,5 mm

Para garantir que as próteses permaneçam funcionais durante longos períodos de tempo, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:

- As próteses devem ser planejadas e confeccionadas em cooperação com o dentista;
- O dentista e o técnico em prótese dentária devem assegurar uma oclusão e articulação equilibradas;
- Todos os produtos odontológicos devem ser utilizados de acordo com as instruções do fabricante. As próteses removíveis, em particular, não devem ser enfraquecidas pelo excesso de desgaste;
- Para garantir uma boa união com a resina da base da prótese, os dentes deverão ser limpos com vapor, asperizados e umedecidos com monômero. Ao completar a prótese com um polímero autopolimerizável, recomendamos também o uso de retenções mecânicas;
- A aplicação de verniz de glaze ou spray dental de limpeza não é recomendada;
- Os dentes não devem entrar em contato com chama ou calor direto;
- O desenvolvimento do calor como resultado de muita pressão durante o desgaste deve ser evitado;
- Recomendamos usar uma máscara facial para proteção durante o desgaste;
- A limpeza é realizada com agentes de limpeza comerciais. O contato com solventes deve ser evitado;
- Se detectada uma alergia contra componentes do produto, os dentes artificiais não devem ser usados;
- Ao usar materiais de recobrimento para C&B, devem ser observadas as instruções de uso correspondentes devem ser observadas;
- Recomendamos o uso de óculos protetores para proteger seus olhos de lascas provenientes do desgaste.

# TÁBUA DE COMBINAÇÕES

		SR Vivodent® S PE Anteriores		SR Orthotyp® S PE (22°) Posteriores
		Superior	Inferior	Superior / inferior
PEQUENO	▲	A22	A3, A5	N3U/N3L, N4U/N4L
	●	A42	A3, A5	N3U/N3L, N4U/N4L
	■	A44	A3, A5	N3U/N3L, N4U/N4L
	■	A11 A13	A3, A5 A3, A5, A6	N3U/N3L, N4U/N4L N3U/N3L, N4U/N4L
MÉDIO	▲	A25	A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	●	A26	A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	■	A54	A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	■	A12 A24B A66	A6, A8 A6, A8 A6, A8	N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L
GRANDE	▲	A27	A9	N5U/N5L, N6U/N6L
	●	A14	A8	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L
	■	A15	A9	N5U/N5L, N6U/N6L
	■	A17	A9	N5U/N5L, N6U/N6L

Esta carta de formas de dentes é recomendada como orientação. No caso de condições anatômicas particulares, desvios são possíveis.

## Ivoclar Academy



Estar sempre no mais recente padrão conhecimento é um sinal de sua competência. A Ivoclar Vivadent apoia você na realização deste objetivo, transmitindo-lhe conhecimento sobre os produtos mais recentes e em relação à aplicação prática e técnicas de trabalho. O nosso espaço Ivoclar Academy oferece continuamente cursos de treinamento básico e avançado, adaptados às suas necessidades.

Visite o nosso site para saber mais sobre os cursos da Ivoclar Brasil.

Para mais informações: [mbbrmarketing@ivoclar.com](mailto:mbbrmarketing@ivoclar.com)

Alameda Rio Negro, 500 - Torre 1 - 19º andar - Alphaville - 06454-000 - Barueri - SP - (11) 2424-7400

\*Imagens ilustrativas | Ivoclar Brasil, empresa do Grupo Ivoclar Vivadent AG - Liechtenstein.

[www.ivoclar.com.br](http://www.ivoclar.com.br) | Curta nossas páginas!

/ivoclar

/ivoclar.br